



FUNDAÇÃO HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nº 1.4.012

**ATIVIDADE: CUIDADOS BÁSICOS COM  
MONITORES CARDÍACOS**

**Data da Emissão:**

18/07/2013

**Data da Revisão:**

08/04/2019

**Data da Próxima  
Revisão:**

08/04/2021

**Responsável:**

- Equipe de enfermagem

**Edição/ Revisão:**

03

**Objetivo:**

Garantir o funcionamento adequado e a conservação do equipamento

### Principais atividades

**MATERIAL NECESSÁRIO:**

- Pano, água e sabão neutro

**PROCEDIMENTO:**

- Lavar as mãos;
- Utilizar EPI's;
- Manter o aparelho sempre no local adequado e seco;
- Evitar locais úmidos ou passíveis de contato com soluções líquidas onde possa ocorrer derramamento de líquido sobre o equipamento;
- Desligar o aparelho da rede elétrica antes de iniciar a limpeza;
- Limpar a parte externa do aparelho com pano umedecido em água e sabão neutro;
- Não utilize produtos químicos como derivados de thinner ou benzina para limpar o equipamento ou seus módulos;
- Nunca molhar os conectores nem mergulhar em líquidos;

- Não utilizar o equipamento se estiver molhado ou com excesso de umidade;
- Não utilizar o aparelho se este apresentar danos externos ou suspeita de queda;
- Instalar o aparelho sempre em locais onde a rede elétrica atenda as condições propostas;
- Não expor ou operar o aparelho em temperaturas extremas;
- Ao transportar o equipamento, faça-o com segurança, prevenindo quedas;
- Manter os cabos enrolados de modo que não fiquem em contato com o chão ou sob o paciente;
- Manter os cabos organizados para facilitar o acesso ao paciente.

**Observações:**

- Limpeza sempre após o uso e a cada troca de pacientes.

**Resultado Esperado:**

- Manter o aparelho e seus acessórios sempre limpos e em bom estado de conservação;

**Elaborado por:**

Raquel Froner

RT de Enfermagem

**Revisado por:**

Franciele dos Santos Dutra

Chefia UTI

**Aprovado por:**

Loredi Becker

Dir. Assistencial