



FUNDAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL  
GETÚLIO VARGAS

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.1031

**Atividade:**

Limpeza do refrigerador de uso assistencial.

**Data da Emissão:**

31/03/2015

**Data da Próxima Revisão:**

21/11/2021

**Data da Revisão:**

21/11/2019

**Edição:** 03**Responsável:**

Técnicos em Enfermagem

**Objetivo:**

Consiste na limpeza da geladeira e retirada do excesso de gelo do congelador.

**Material Necessário:**

- Compressas;
- Sabão líquido;
- Recipiente com água;
- Álcool a 70%;
- Luvas de procedimento.

**PRINCIPAIS ATIVIDADES****Responsável**

- Retirar os materiais existentes no interior do refrigerador/congelador e transferi-los para o aparelho refrigerador ou caixa isolante (isopor);
- Desligar o frigobar/congelador;
- Realizar a limpeza interna e externa com água e sabão;
- Enxaguar muito bem com pano embebido em água;
- Secar com pano seco e limpo;
- Passar álcool a 70% na parte externa do refrigerador;
- Ligar o frigobar/refrigerador;
- Recolocar os materiais retirados quando a temperatura atingir a preconizada.

Técnico de enfermagem

**Observações:**

- Executar o processo quinzenalmente.

**Resultado Esperado:**

Higiene e degelo adequado.

**Referência Bibliográfica:**

Não possui referências por se tratar de uma rotina da instituição

**Elaborado por:**

Patricia Bienert

Diretora de Atenção a Saúde

**Revisado por:**

Aline Steffen  
Enfermeira

**Aprovado por:**

Loredi Becker  
Diretora Hospitalar