



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.1.035

Atividade: Limpeza dos monitores cardíacos e Oxímetros	Data da Emissão: 04/01/2015	Data da Revisão: 26/11/2021
	Data da Revisão: 26/11/2019	Edição: 04
Responsável: Técnico de enfermagem ou Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Prevenir infecções; Manter o equipamento limpo e pronto para uso;		
Material necessário: <ul style="list-style-type: none">• Água corrente;• Sabão neutro;• Pano para limpeza;• Luvas de procedimento.		
Principais Atividades		Responsável
<ul style="list-style-type: none">• Desconectar os eletrodos da pele;• Desligar o aparelho da tomada;• Levar o aparelho ao local adequado para limpeza;• Limpar os eletrodos e sensores com pano úmido e sabão e secar bem, antes de guardar;• Limpar cabos e fios terra;• Limpar o corpo do monitor com pano úmido e sabão, sem excesso de água;• Secar o aparelho e deixar ligado na tomada;• Rotular com data da limpeza e assinar;		Técnico de Enfermagem e ou auxiliar de Enfermagem
Observações: <ul style="list-style-type: none">• Não utilizar álcool para limpeza de equipamentos.• Realizar limpeza de monitores e oxímetro após uso do paciente, ou quando visivelmente sujo.		
Resultado Esperado: Manter monitores e oxímetros limpos		
Referência Bibliográfica: Couto R. C. Guia ; Prático de Controle de Infecção Hospitalar – Epidemiologia, Controle e Terapêutica. 5° Ed.		
Elaborado por: Patrícia Bienert Diretora de Atenção a Saúde	Revisado por: Aline Steffen Enfermeira	Aprovado por: Loredi Becker Diretora Hospitalar