



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N° 1.6.51

Atividade:

Limpeza da incubadora

Data da Emissão:

04/01/2015

Data da Revisão:

08/04/2021

Data da Revisão:

08/04/2019

Edição:

03

Responsável:

Enfermeiro/Técnico de enfermagem

Objetivo:

- Prevenir infecções;
- Manter material limpo e em condições para uso.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Material necessário:

- Água corrente;
- Sabão neutro ou sabão próprio para desinfecção.
- Panos para limpeza ou compressas;
- Vaselina.

Procedimento:

- Levar o equipamento para local adequado e retirar da corrente elétrica;
- Reunir o material e leva-lo para junto da incubadora;
- Desmontar todas as partes removíveis da incubadora;
- Lavar com pano úmido e sabão a cúpula de acrílico, removendo as partes duplas (se houver);
- Lavar a cúpula primeiro por dentro, removendo toda e qualquer sujeira. Retirar a bandeja e passar pano no fundo da incubadora e em baixo da bandeja;
- Remover borrachas de vedação das portinholas e da bandeja interna;
- Limpar a bandeja e as partes metálicas;
- Secar bem o interior da incubadora;
- Proceder a limpeza externa da cúpula e parte inferior da incubadora;
- Retirar cola de esparadrapo com benzina ou vaselina;
- Limpar estetoscópio, cabo ou sensores;
- Abrir e limpar a parte inferior;
- Colocar etiqueta com data e assinar;

Observações:

- A higiene diária externa do equipamento deverá ser feita a cada 6h com pano úmido;
- Pode-se substituir o uso de água e sabão pelo produto INCIDIN
- A incubadora deve ser lavada internamente após 7 dias de uso ou mediante alta do RN
- Colocar data de início do uso da incubadora;
- Não utilizar álcool ou esfregão para limpeza do equipamento;
- Não usar álcool ou esponja com sapólio na limpeza;
- Não utilizar a parte mais grossa da esponja.

Referência Bibliográfica:

- Enfermagem Pediátrica , ELEMENTOS ESSENCIAIS Á INTERVENÇÕES EFETIVAS- Whaley E Wong - 5° Ed.
- Couto R. C.Guia ; Prático de Controle de Infecção Hospitalar – Epidemiologia, Controle e Terapêutica.

5° Ed.

Elaborado por:
Enfª. Patrícia Bienert
Coord. LCMB

Revisado por:
Tiago Plá Pereira
RT de Enfermagem

Aprovado por:
Loredi Becker
Diretora Hospitalar