



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N° 1.6.52

Atividade: Limpeza do berço aquecido e comum	Data da Emissão: 04/01/2015	Data da Revisão: 08/04/2021
	Data da Revisão: 08/04/2019	Edição: 03
Responsável: Enfermeiro/Técnico de enfermagem		
Objetivo: <ul style="list-style-type: none">- Prevenir infecções;- Manter material limpo e pronto para uso;		
PRINCIPAIS ATIVIDADES		
Material necessário: <ul style="list-style-type: none">- Água corrente;- Sabão neutro ou sabão próprio para desinfecção- Vaselina;- Panos para limpeza ou compressas;		
Procedimento: <ul style="list-style-type: none">- Desconectar o berço da tomada elétrica;- Retirar a roupa suja;- Lavar a parte superior e inferior do colchão com água e sabão, enxaguar e secar;- Lavar a cesta de acrílico com água e sabão, enxaguar e secar;- Colocar o colchão sobre a cesta limpa;- Lavar toda a armação metálica com água e sabão, enxaguar e secar;- Limpar cabo e estetoscópio;- Remover com vaselina marcas de esparadrapo;- Lavar as rodinhas, enxaguar adequadamente e secar;- Vestir o berço para o uso ou guarda-lo no local adequado;- Rotular com a data da limpeza e assinar;		
Observações: <ul style="list-style-type: none">- Proceder a limpeza do berço a cada 7 dias, sempre que necessário ou quando o paciente tiver alta;		
Referência Bibliográfica: <ul style="list-style-type: none">- Enfermagem Pediátrica , ELEMENTOS ESSENCIAIS Á INTERVENÇÕES EFETIVAS- Whaley E Wong - 5° Ed.- Couto R. C.Guia ; Prático de Controle de Infecção Hospitalar – Epidemiologia, Controle e Terapêutica. 5° Ed.		
Elaborado por: Enfª. Patrícia Bienert Coord. LCMB	Revisado por: Tiago Plá Pereira RT de Enfermagem	Aprovado por: Loredi Becker Diretora Hospitalar