



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N° 1.6.53

Atividade:

Limpeza de bilispot e aparelho de fototerapia

Data da Emissão:

04/01/2015

Data da Revisão:

08/04/2021

Data da Revisão:

08/04/2019

Edição:

03

Responsável:

Enfermeiro/Técnico de enfermagem

Objetivo:

- Prevenir infecções;
- Manter equipamento limpo e pronto para uso;

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Material necessário:

- Água;
- Sabão;
- Pano;
- Luvas de procedimento;
- Vaselina.

Procedimento:

- Levar o material para local adequado à higienização;
- Verificar se está fora da rede elétrica;
- Passar pano embebido em água e sabão em todo o aparelho, começando pela caixa de lâmpadas até o pé;
- Limpar o cabo de força;
- Retirar a proteção da lâmpada para limpeza interna;
- Retirar marcas de cola com vaselina;
- Secar;
- Testar o aparelho para verificar se a lâmpada está funcionando, se o plug e fio estão em boas condições;
- Colocar etiqueta com data e turno da limpeza;
- Qualquer alteração, comunicar o enfermeiro;

Observações:

- A limpeza deve ser feita a cada 7 dias ou quando for suspensa a fototerapia do paciente;
- Nunca guardar o aparelho sem ter sido limpo.

Referência Bibliográfica:

- Enfermagem Pediátrica, ELEMENTOS ESSENCIAIS À INTERVENÇÕES EFETIVAS- Whaley E Wong - 5° Ed.
- Couto R. C. Guia; Prático de Controle de Infecção Hospitalar – Epidemiologia, Controle e Terapêutica. 5° Ed.

Elaborado por:

Enfª. Patrícia Bienert
Coord. LCMB

Revisado por:

Tiago Plá Pereira
RT de Enfermagem

Aprovado por:

Loredi Becker
Diretora Hospitalar