



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
Nº 1.2.012

ATIVIDADE: CUIDADOS BÁSICOS COM MONITORES CARDÍACOS	Data da Emissão: 01/04/2015	Data da próxima Revisão: 01/04/2021
	Data da Revisão: 01/04/2019	Edição: 03
Responsável: ✓ Equipe de enfermagem		
Objetivo: Garantir o funcionamento adequado e a conservação do equipamento		
Principais atividades		
MATERIAL NECESSÁRIO: ✓ Pano, água e sabão neutro		
PROCEDIMENTO: <ul style="list-style-type: none">✓ Lavar as mãos;✓ Utilizar EPI's;✓ Manter o aparelho sempre no local adequado e seco;✓ Evitar locais úmidos ou passíveis de contato com soluções líquidas onde possa ocorrer derramamento de líquido sobre o equipamento;✓ Desligar o aparelho da rede elétrica antes de iniciar a limpeza;✓ Limpar a parte externa do aparelho com pano umedecido em água e sabão neutro;✓ Não utilize produtos químicos como derivados de thinner ou benzina para limpar o equipamento ou seus módulos;✓ Nunca molhar os conectores nem mergulhar em líquidos;✓ Não utilizar o equipamento se estiver molhado ou com excesso de umidade;✓ Não utilizar o aparelho se este apresentar danos externos ou suspeita de queda;✓ Instalar o aparelho sempre em locais onde a rede elétrica atenda as condições propostas;✓ Não expor ou operar o aparelho em temperaturas extremas;✓ Ao transportar o equipamento, faça-o com segurança, prevenindo quedas;✓ Manter os cabos enrolados de modo que não fiquem em contato com o chão ou sob o paciente;✓ Manter os cabos organizados para facilitar o acesso ao paciente.		
Observações: ✓ Limpeza sempre após o uso e a cada troca de pacientes.		
Resultado Esperado: ✓ Manter o aparelho e seus acessórios sempre limpos e em bom estado de conservação;		
Referência Bibliográfica: Bueno, M. A. S.; Pieri, A.; Sampaio, R. O.; Santos, O. F. P.; Vaidotas, M. Conduas em Emergências: Unidade de primeiro Atendimento (UPA) Hospital Israelita Albert Einstein. São Paulo: Editora Atheneu, 2009. 2v. Santos, M. N.; Soares, O. M. Urgência e emergência na prática de enfermagem. 1. ed. Porto Alegre,RS: Moriá, 2014. 2v.		
Elaborado por: Raquel Froner RT de Enfermagem	Revisado por: Fabiana Souza/ Andrea Longoni Enfermeira	Aprovado por: Loredi Becker Dir. Assistencial