



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.5.029

Atividade:

USO DO ÁCIDO PERACÉTICO

Data da Emissão:

20/07/2013

Data da Revisão:

11/07/2019

Próxima Revisão:

11/07/2021

Edição: 03**Responsável:**

Técnico de Enfermagem do CME

Objetivo:

USO DO ÁCIDO PERACÉTICO COMO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL- A 1% (RDC 31 DE 04/11/2011)

Material necessário:

ÁCIDO, ÁGUA, MEDIDOR, EPI'S

Principais atividades

USO DE EPIS: LUVA, MÁSCARA

1. Lavar as mãos
2. Após lavar e secar os artigos semi críticos colocar em imersão no ácido peracético (já preparado POP 1.5.028)
3. Colocar os materiais submersos na diluição do Ácido Peracético por 30 minutos.
4. Proceder com o enxágüe em água corrente e secagem.
5. Embalar adequadamente conforme cada artigo.

Responsável

Enfermeiro/
Técnico de
Enfermagem.

Resultado Esperado: Agir mesmo em presença de matérias orgânicas**Referências Bibliográficas: Rotina da unidade**

Elaborado por: Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Revisado por - Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Aprovado por:
LOREDI BECKER DIRETORA
ASSISTENCIAL

Identificação interna do documento FYVDS3259X-OSKI6EX2



Nome do arquivo:

29._uso_do__cido_perac_tico_201910091600034937650.doc

Data de vinculação ao processo: 09/10/2019 16:00

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Processo: 6954