



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.5.033

Atividade:

Limpeza de artigos não críticos e semi críticos para Assistência Respiratória

Data da Emissão:

20/01/2014

Data da Revisão:

11/07/2019

Próxima Revisão:

11/07/2021

Edição: 03

Responsável: Técnico de enfermagem.

Objetivo: Proporcionar segurança na utilização do material de assistência ventilatória

Material necessário:

EPIS; avental, luvas de borracha, máscara e óculos de proteção.

Umidificadores, nebulizadores, máscara de Venturi e circuitos de respiradores.

Ácido Peracético 0,2%.

Caixa plástica com tampa.

Cesto plástico,

Água corrente,

Campos de algodão limpos,

Compressas,

Ar comprimido,

Principais atividades**Responsável**

Higienizar as mãos,
Paramentar-se com avental, luva de borracha,
Máscara e óculos de proteção (EPIS),
Lavar material com detergente enzimático, deixar por 15 ou 30 min de acordo com fornecedor.
Enxaguar material e secar
Colocar em ácido peracético 0,2% em caixa plástica com tampa,
Fechar a caixa com a tampa, evitando a volatilização da solução,
Aguardar 30 minutos ou de acordo com fornecedor,
Retirar o material da caixa,
Enxaguar com água corrente,
Secar material com compressas estéreis, e se necessário utilizar o ar comprimido,
Encaminhar o material para área de preparo
Embalar conforme material,
Identificar conforme rótulo RDC,

Auxiliar e técnico de
Enfermagem

Resultado Esperado: Proporcionar, a máxima limpeza e segurança na limpeza de artigos não críticos e semi críticos, para sistemas respiratórios.

Referências Bibliográficas: RDC 15 de 15 de Março de 2012/ ROTINA DA UNIDADE

Elaborado por: Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Revisado por - Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Aprovado por:
LOREDI BECKER DIRETORA
ASSISTENCIAL

Identificação interna do documento NCCS9N5PSV-MWB8CIT2



Nome do arquivo:

33._POP__limpeza_de_artigos_n_o_criticos_e_semi_criticos_para_si
stema_respirat_rio._201910091556474583727.doc

Data de vinculação ao processo: 09/10/2019 15:56

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Processo: 6946