



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.5. 057

Atividade:**CICLOS DA AUTOCLAVE****Data da Emissão:**

30/06/2014

Data da Revisão:

11/07/2019

Próxima Revisão:

11/07/2021

Edição: 03**Responsável:**

ENFERMEIRO/TÉCNICO/ AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CME

Objetivo:

Atender a todos os parâmetros da esterilização, especificamente na esterilização por vapor saturado.

Atender aos parâmetros de TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA de acordo com cada material.

Principais atividades:

1. Treinar, orientar e supervisionar o uso dos ciclos adequados de cada material.
2. CICLO 1: 134° por 7 minutos- ciclo utilizado para instrumentais em geral
3. CICLO 2: 121° por 15 minutos- ciclo utilizado para tecidos, perfurador, craniótomo, látex, bandeja de videocirurgia.
4. CICLO 10: Ciclo utilizado exclusivamente para BOWIE DICK
5. CICLO 12: 121° por 15 minutos- ciclo utilizado para filtros, reanimadores, perinhas, manoplas, material do Faco.

**Responsável
Enfermeiro****Técnico de
Enfermagem****Resultado Esperado:** realizar esterilização dos materiais nos ciclos adequados.**Referências Bibliográficas:** RDC 15 de 15 de Março de 2012/ ROTINA DA UNIDADE/ FABRICANTE DA AUTOCLAVE SERCON**Elaborado por:** Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390**Revisado por -** Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390**Aprovado por:**
LOREDI BECKER DIRETORA
ASSISTENCIAL

Identificação interna do documento Q5IHGSQJ68-VM5OQLL2



Nome do arquivo:

57.CICLOS_DA_AUTOCLAVE_20191009110715372407.doc

Data de vinculação ao processo: 09/10/2019 11:07

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Processo: 6903