



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.5.072

Atividade:

VALIDAÇÃO GLUTARALDEÍDO

Data da Emissão:

17/08/2017

Data da Revisão:

11/07/2019

Próxima Revisão:

11/07/2021

Edição: 02**Responsável:**

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Objetivo:

Monitorização da Concentração Mínima Eficaz de Glutaraldeído

Material necessário:

Frasco com tira teste, planilha de registro, EPIs

Principais atividades

1. Lavar as mãos;
2. Reunir o material necessário (frasco com tira teste, planilha de registro, EPIs)
3. Calçar luvas de procedimento, colocar óculos de proteção e máscara;
4. Retire um monitor do frasco, e feche novamente o mesmo com firmeza;
5. Faça a imersão da zona de reação da tira numa solução de glutaraldeído 2% ativada, misturada, durante um segundo e retire-a imediatamente. Não deixe a tira na solução nem a agite enquanto ela lá estiver;
6. Deixar que escorra o excesso de líquido pela borda longitudinal da tira sobre um papel absorvente. Não sacuda a tira do teste.
7. Coloque a fita teste em uma superfície plana e deixe por 5 segundos;
8. Classificar a cor da zona de reação da melhor maneira possível de acordo com a tabela de cor presente na etiqueta do frasco.
9. Se a cor da reação química for uniformemente AMARELA (para marca GLUTARON) , a solução poderá ser utilizada ou Reutilizada (o monitor indicar que a solução obedece aos níveis estabelecidos).
10. Não leia a fita teste depois de transcorrido o tempo da reação, pois a zona de reação pode continuar mudando de cor , dificultando a interpretação do real resultados;
11. Registrar em planilha própria a data de realização do teste e o resultado.
12. Realizar diariamente o teste.
13. Observar características macroscópicas da solução tais como coloração, resíduos e em caso suspeito realizar o teste mesmo que não tenha atingido o prazo mínimo.
14. Mantenha os monitores de ácido peracético na embalagem original. Feche bem a tampa.

Resultado Esperado: Utilizar o Glutaraldeído validado**Referências Bibliográficas:** RDC 15 de 15 de Março de 2012/ ROTINA DA UNIDADE/ FABRICANTE DO GLUTARALDEÍDO

Elaborado por: Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Revisado por - Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Aprovado por:
LOREDI BECKER DIRETORA
ASSISTENCIAL

Identificação interna do documento 01A14NB3X8-ZXOPPT62



Nome do arquivo:

72._VALIDA__O_GLUTARALDE_DO_201910091105527145174.doc

Data de vinculação ao processo: 09/10/2019 11:06

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Processo: 6902